

DANKODE[®]

MARCATRICE PNEUMATICA DV7/1



USO E MANUTENZIONE

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative.

In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo o delle istruzioni operative potranno generarsi situazioni pericolose con rischio di danni o lesioni a cose e/o persone. Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni evenienza futura.

SICUREZZA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO

Mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro. Il disordine e le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.

SICUREZZA DELLE PERSONE

Mantenere lontani i bambini ed altre persone. Durante l'impiego della marcatrice eventuali distrazioni possono comportare la perdita del controllo della stessa con conseguente rischio di danni o lesioni a cose e/o persone.

SICUREZZA DELL'OPERATORE

E' importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con cautela la marcatrice durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare la marcatrice in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche e/o medicinali.

USARE SEMPRE LA MARCATRICE IN MODO APPROPRIATO

Eeguire solamente lavori di marcatura animale per i quali la marcatrice è stata costruita. Non utilizzarla mai per lavori diversi da quelli riportati nel presente manuale. Non puntare mai la marcatrice verso persone o cose diverse dall'area da tatuare.


TENERE LE MANI ED IL CORPO LONTANO DAI PUNZONI

Un colpo potrebbe inavvertitamente essere attuato e provocare ferite all'operatore.

INSERIRE IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Durante le pause tra una marcatura ed un'altra, al termine del lavoro e durante le operazioni di collegamento all'alimentazione aria compressa inserire sempre il dispositivo di sicurezza posto dietro al grilletto della marcatrice (vedi Istruzioni d'uso).

CARATTERISTICHE TECNICHE

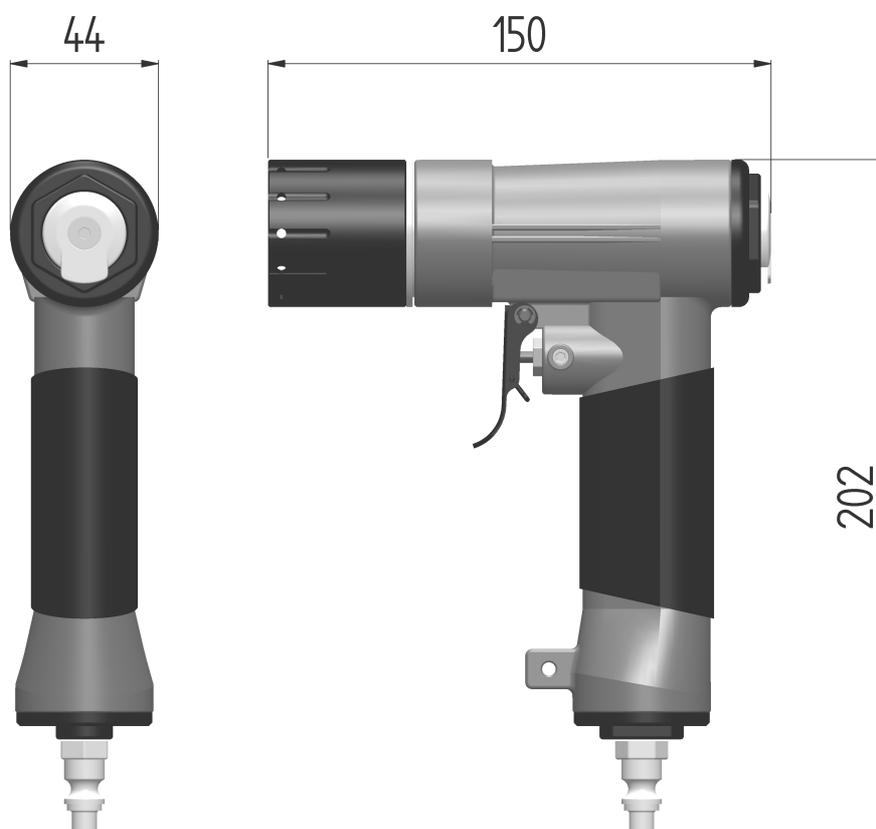

DIMENSIONI

A x L x P: 202 x 44 x 150 mm

Peso: 0,79 Kg

Pressione di esercizio: 5 – 8 bar (0.5 – 0.8 Mpa)

Consumo aria per ciclo: 0.27 NI/ciclo (6 bar)

POTENZA ACUSTICA

Dir. 89/392 CEE – prEN 12549 (1999) – UNI EN ISO 3744 (1997)

LwA: 80.3 dB

LpA 60S 1M : 78.9 dB

VIBRAZIONI PRODOTTE

Dir. 89/392 CEE – ISO/FDIS 8662-11 (1999)

ah.w.3s : inferiore a 2.5 m/s²

MANUTENZIONE

La marcatrice pneumatica DV 7/1 non richiede particolari manutenzioni. Dopo l'uso smontare i punzoni dalla marcatrice (vedi Istruzioni d'uso) e pulirli accuratamente lavandoli con acqua calda e alcool o bicarbonato di sodio; con l'aiuto di una spazzola eliminare tutti i residui di inchiostro. Lasciarli asciugare completamente, ungerli e riporli in luogo asciutto. Pulire tutte le parti della marcatrice a contatto con l'inchiostro da tatuaggio usando acqua e alcool, asciugare bene la marcatrice e riporla in luogo asciutto e sicuro. **ATTENZIONE !** Non immergere mai la marcatrice in acqua o gasolio ed evitare l'entrata di liquidi nei condotti di alimentazione e scarico aria. È necessario prestare attenzione nell'utilizzo della marcatrice affinché l'aria di alimentazione sia filtrata, lubrificata ed essiccata per prevenire depositi e condense all'interno della marcatrice che potrebbero essere causa di malfunzionamenti. Nel caso in cui il compressore in possesso non disponga del gruppo lubrificatore si consiglia di immettere alcune gocce di olio di vasellina nel condotto di alimentazione dell'aria prima di utilizzare la marcatrice. Evitare di utilizzare qualsiasi altro tipo di lubrificante (Svitol, WD40, spray ecc) o antiruggine di origine sintetica per prevenire la corrosione delle guarnizioni di tenuta.

Per le operazioni di manutenzione straordinaria e/o riparazione, nonché per la fornitura di particolari di ricambio, rivolgersi a:

DANKODE s.r.l.

Via I° Maggio 5/11, 40037 Sasso Marconi (BO)

Tel: (+39) 0516777832

www.dankode.com/vet – info.vet@dankode.com

L'utilizzo di parti non originali od il ricorso ad assistenza non autorizzata comporta l'invalidazione del periodo di garanzia, oltre al possibile danneggiamento di altri componenti della marcatrice.

ISTRUZIONI D'USO


1 – DISPOSITIVO DI SICUREZZA




Prima di procedere a qualsiasi operazione di sostituzione dei punzoni, collegamento o scollegamento dal circuito di alimentazione e comunque prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione sulla marcatrice assicurarsi di avere inserito il dispositivo di sicurezza. Per inserire la sicurezza ruotare la sicura (A) verso l'alto (vedi figura) fino al bloccaggio del grilletto.

2 – MONTAGGIO TARGHETTA INTERA

Svitare la ghiera (B) ruotandola in senso antiorario e sfilarla dalla parte anteriore della marcatrice. Inserire la Targhetta Intera (C) corrispondente al mese di nascita dell'animale (vedi figura). Il verso di montaggio della placca deve permettere la lettura del codice dalla parte posteriore della marcatrice. Rimontare la ghiera (B) invitandola in senso orario.

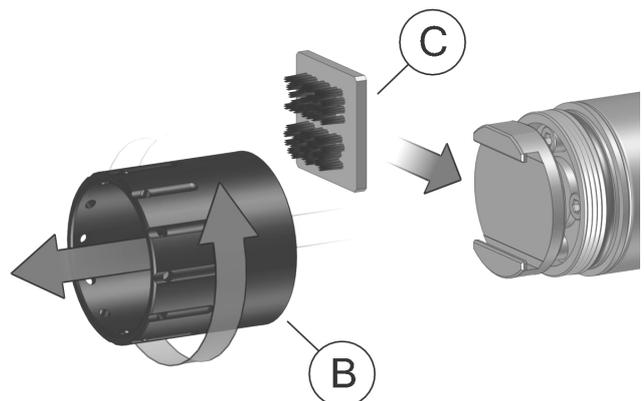


3 – COLLEGAMENTO ARIA COMPRESSA

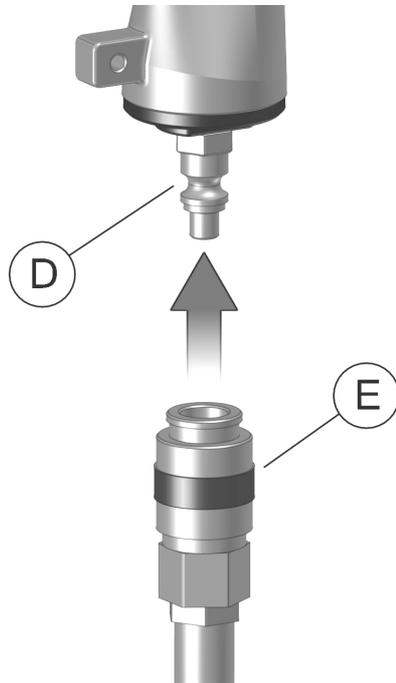


Collegare la marcatrice al tubo dell'aria compressa (E) tramite l'attacco rapido (D) posto nella parte inferiore della marcatrice (vedi figura). Durante l'utilizzo della marcatrice è importante assicurarsi che la pressione dell'aria di alimentazione non scenda mai al di sotto dei 5 bar e non superi gli 8 bar. Usare soltanto aria filtrata e lubrificata; l'uso di qualsiasi altra alimentazione come gas combustibili o gas compressi può provocare esplosioni con conseguenti danni alle persone.

4 – ESECUZIONE DELLA MARCATURA

Spruzzare l'inchiostro sulla cute dell'animale nella zona da tatuare, posizionare la ghiera (F) sulla coscia dell'animale centrandola sulla macchia di inchiostro; premere la marcatrice avendo cura di far aderire la ghiera (F) alla cute dell'animale e premere il grilletto (G) (vedi figura). A tatuaggio avvenuto massaggiare ripetutamente la cute dell'animale appena tatuata per favorire la penetrazione dell'inchiostro.

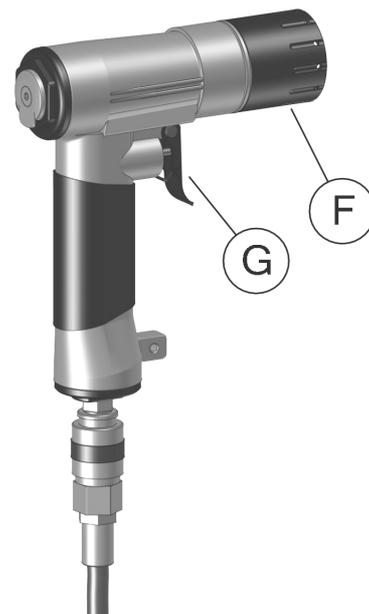


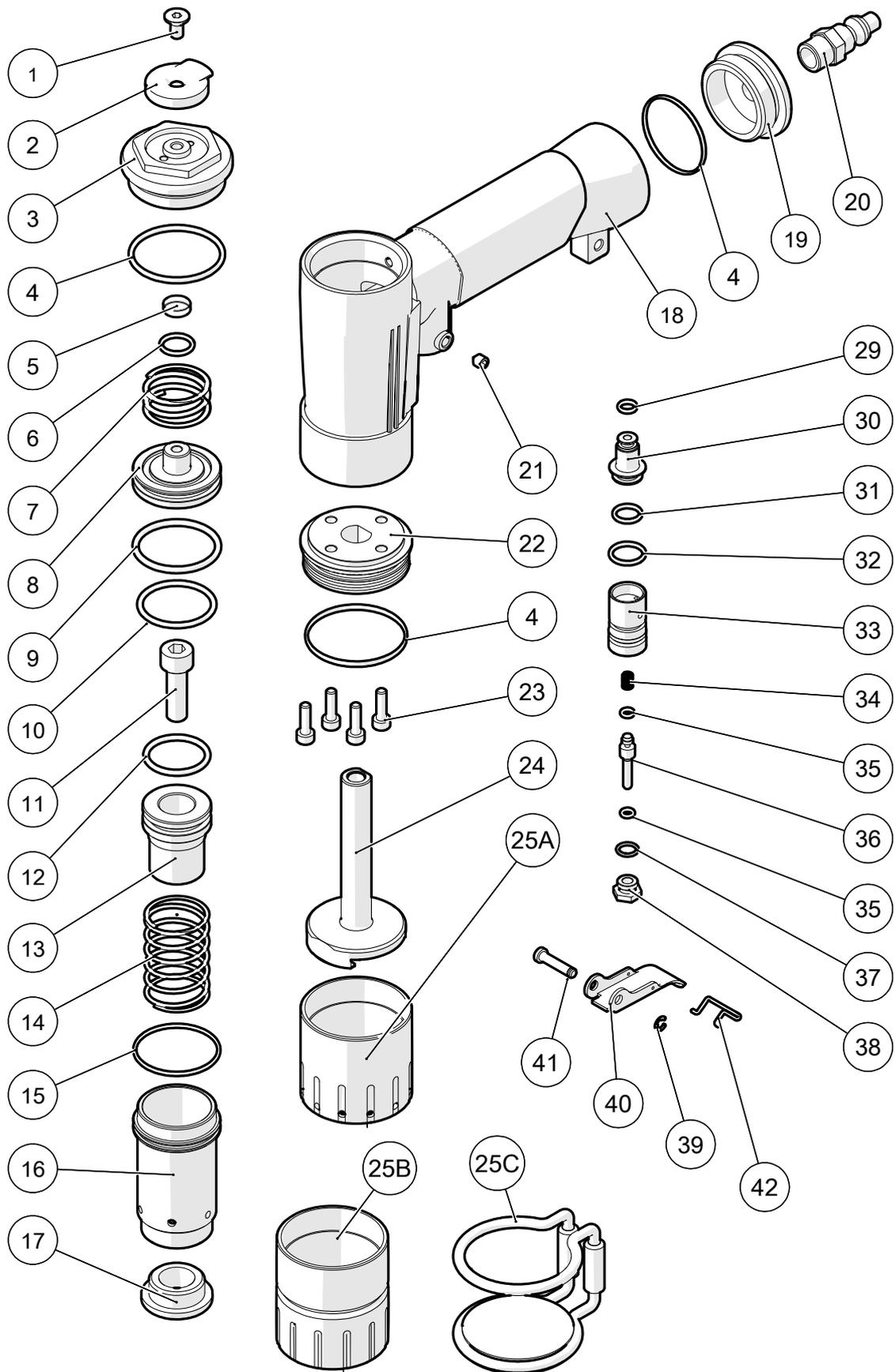

N°	COD.	DENOMINAZIONE	Q.tà	N°	COD.	DENOMINAZIONE	Q.tà
1	5000640501	VITE VTSEI M5 x 10 INOX	1	21	5001130500	VITE VSTEI M5 x 6 INOX	1
2	1013400010	PROTEZIONE SCARICO ARIA	1	22	4006300030	FLANGIA ANTERIORE	1
3	4003700020	COPERCHIO POSTERIORE	1	23	5000050405	VITE VTCEI M4 x 14 INOX	4
4	5030100053	ANELLO O-RING 3131	3	24	4016200110	STELO LUNGO PORTA PLACCA	1
5	4012200120	AMMORTIZZO VALVOLA	1	25A	4007100071	GHIERA	1
6	5030100011	ANELLO O-RING 2043	1	25B+ 25C	4007100120B	GHIERA CON CONTRASTO	1
7	4010400090	MOLLA RITORNO VALVOLA	1	29	5030100004	ANELLO O-RING 2018	1
8	4018400030	VALVOLA PISTONE	1	30	4018400020	VALVOLA GRILLETTO	1
9	5030100051	ANELLO O-RING 3118	1	31	5030100009	ANELLO O-RING 108	1
10	5030100049	ANELLO O-RING 3106	1	32	5030100012	ANELLO O-RING 114	1
11	5000050808	VITE VTCEI M8 x 20 INOX	1	33	4003800090	CORPO GRILLETTO	1
12	5030100044	ANELLO O-RING 3087	1	34	4010400100	MOLLA GRILLETTO	1
13	4012700020	PISTONE	1	35	5030100000	ANELLO O-RING 2007	2
14	4010400120	MOLLA RITORNO PISTONE	1	36	4012400020	PERNO VALVOLA	1
15	5030100025	ANELLO O-RING 2125	1	37	5030100005	ANELLO O-RING 2021	1
16	4003200020	CILINDRO	1	38	4003700030	COPERCHIO GRILLETTO	1
17	4000500050	ANELLO PARACOLPO	1	39	5009200005	SEEGER GRILLETTO D 3.2	1
18	4003800080	CORPO	1	40	4007500010	GRILLETTO	1
19	4016900020	TAPPO PORTARACCORDO	1	41	4012400010	PERNO GRILLETTO	1
20	5046900001	ATTACCO RAPIDO ARIA	1	42	4010400110	SICURA GRILLETTO	1

ACCESSORI

GHIERA ASL (42 mm) CON APPOGGIO

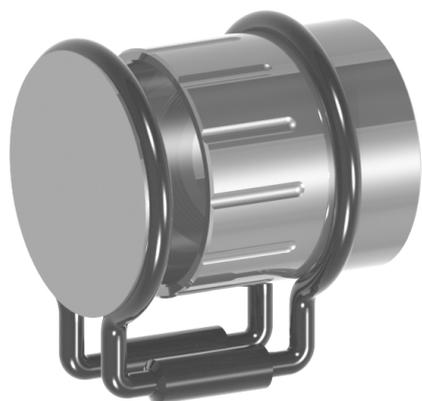

Ghiera in acciaio brunito (lunghezza 42 mm) per tatuaggio auricolare ASL completa di anello di appoggio. Per il tatuaggio auricolare è necessario utilizzare una “Targhetta Auricolare”.

INCHIOSTRO SPRAY PECKER®



Lo spray PECKER con getto nebulizzato favorisce la penetrazione del pigmento nella cute ed il suo colore nero intenso genera un tatuaggio molto scuro, ben leggibile e permanente nel tempo.

GARANZIA

Il prodotto è garantito per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di acquisto. Per garanzia si intende la riparazione o la sostituzione della marcatrice che presenti difetti di fabbricazione.

La garanzia ha validità solamente nel caso in cui il presente certificato di garanzia, compilato in tutte le sue parti dall'acquirente ed accompagnato dalla prova d'acquisto valida (fattura di vendita per l'Utilizzatore), venga presentato all'atto della richiesta di intervento. Il prodotto non conforme dovrà essere riconsegnato nell'imballo originale, completo di tutti gli accessori. Il numero di matricola presente sul prodotto (sull'adesivo superiore e in copia inciso su (19) tappo portaraccordo) non dovrà essere in alcun modo cancellato né tanto meno reso illeggibile, pena l'invalidità della garanzia. La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, manomissione, modifiche del prodotto o del numero di matricola, danni dovuti a cause accidentali o a negligenza dell'acquirente con particolare riferimento alle parti esterne.

Sono escluse dalla garanzia le parti soggette a usura in seguito all'utilizzo. Trascorso il periodo di garanzia, gli interventi di assistenza verranno esplicitati addebitando le parti sostituite, le spese di mano d'opera e di trasporto, secondo le tariffe in vigore.

GARANZIA

N° MATRICOLA MARCATRICE.....

DATA ACQUISTO

FIRMA



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il Costruttore di marcatrici pneumatiche:

DANKODE s.r.l.

dichiara sotto la sua responsabilità che i prodotti da lui costruiti sono conformi agli standard: EN 292 – parti 1 e 2 e alla direttiva 89/392/CEE e sue successive modifiche.

Rivenditore:

DANKODE s.r.l.

Via I° Maggio 5/11, 40037 Sasso Marconi (BO) - Italy

Tel: (+39) 0516777832

www.dankode.com/vet – info.vet@dankode.com